

Rukavice za pregled od nitrila Kid-Man®

Predviđena namjena:



Upute za uporabu



Upute za uporabu MORAJU se dostaviti korisniku proizvoda. PRIJE upotrebe proizvoda, MORATE pročitati ove upute za upotrebu i pohraniti ih za buduću upotrebu.



Osnovni zahvati i odjeli



Čišćenje



Rukovanje hranom

UVOD

- ▶ Upute u nastavku trebale bi se koristiti zajedno s detaljnim podacima na pakiranju.
- ▶ Jednokratne rukavice za pregled i zaštitne rukavice od nitrila; bez pudera; nesterilne.
Opaz: Prikladno za kontakt s hranom (vrijeme kontakta ne smije biti dulje od 30 minuta, a kontaktna temperatura ne smije biti viša od 40 stupnjeva). Bez lateksa, bez pudera i bez DEHP/DOP-a. U skladu s MD Uredbom (EU) 2017/745 (Klasa 1), EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009, PPE Uredbom (EU) 2016/425 (CAT III), EN ISO 21420:2020 i EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Prije upotrebe provjerite postoje li oštećenja. Ne koristite oštećene rukavice.
- ▶ Pravilno navlačenje i skidanje rukavica vještina je koju zdravstveni radnici i drugi koji koriste rukavice trebaju vježbati. Navlačenje se mora izvoditi ispravnim redoslijedom kako bi se spriječio prijenos infekcija. Ruke trebaju biti čiste prije navlačenja rukavica. Prilikom skidanja rukavica, izbjegavajte da vanjska površina rukavica dođe u dodir s vašom kožom, jer bi površina mogla biti kontaminirana krvlju i drugim tjelesnim tekućinama. Izbjegavajte natezanje jer to može uzrokovati prskanje kontaminanata u vaše oči ili usta ili na vašu kožu ili druge osobe u blizini.

SASTOJCI / OPASNI SASTOJCI

Sastojci koje se koriste u izradi rukavica mogu izazvati alergijske reakcije kod nekih ljudi. Neke rukavice mogu sadržavati komponente za koje se zna da su mogući uzrok alergije kod osoba alergičnih na njih te kod kojih može doći do iritacije i/ili alergijske reakcije. U slučaju alergijske reakcije potražite liječničku pomoć.

OZNAČAVANJE

Rukavice su kategorije III, Osobna zaštitna oprema prema Dodatku I Uredbe 2016/425 i u skladu su sa standardima: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-2:2019.

- ▶ Svaka jedinica prikazuje sljedeće podatke: referencu proizvoda, broj serije i datum isteka.
- ▶ Simboli koji se koriste u skladu sa standardom EN ISO 15223: Simboli koji se koriste s oznakama medicinskih proizvoda, označavanje i informacije koje treba dostaviti.

CE 2777

Prijavljeno tijelo odgovorno za certifikaciju i stalnu sukladnost: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irska



EN ISO 374-5:2016
Štiti od virusa

Otpornost na bakterije i gljivice - pasivna. Otpornost na viruse - pasivna.*
Probajna otpornost je ocijenjena u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitani uzorak.

KLJUČNA SVOJSTVA

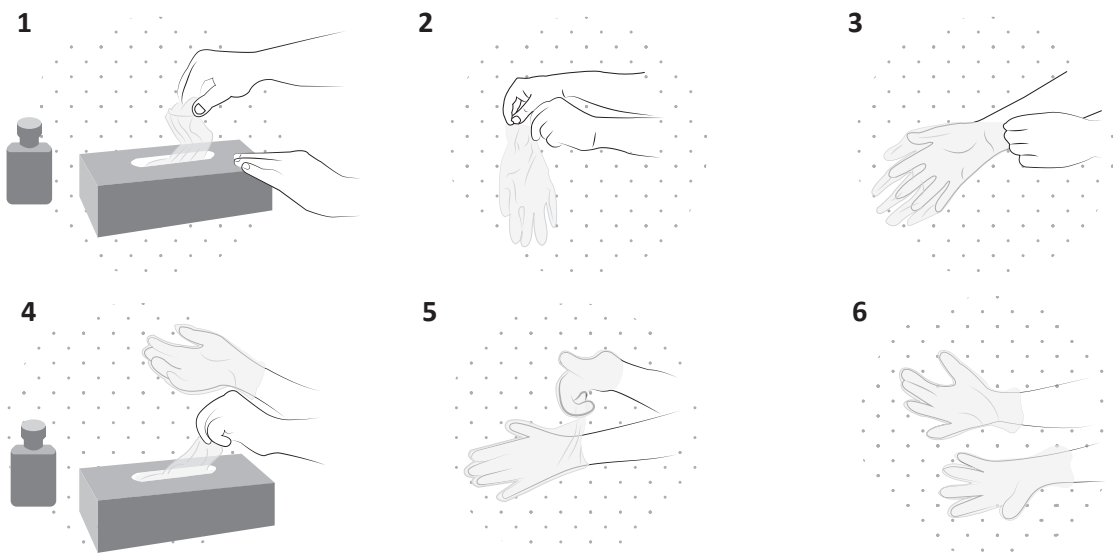
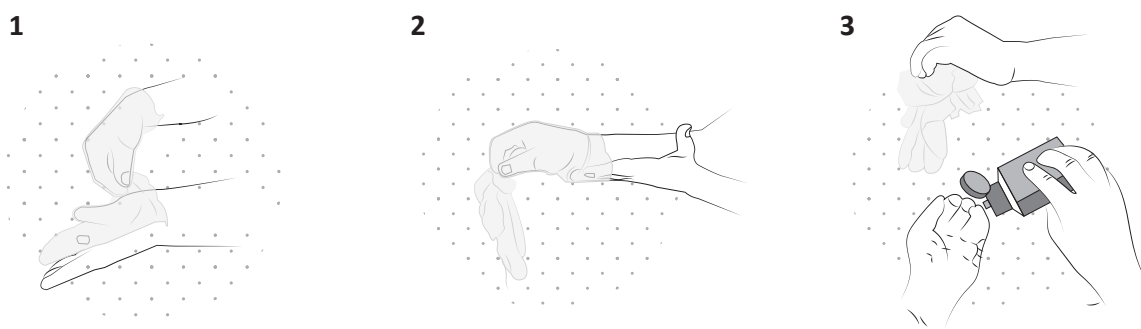
- ▶ Tanka rukavica od nitrila bez pudera, može se nositi na obje ruke i sa smotanom rubom za dodatnu čvrstoću manšete
- ▶ Dobra virusna barijera, štiti od raznih kemikalija
- ▶ Izvrsna taktilna osjetljivost, poboljšano mokro i suho držanje vrhovima prstiju s mikroteksturom
- ▶ Izvrsno pristaje, lako se navlači i i skida
- ▶ Bez lateksa, pudera i proteina, dobra alternativa onima koji pate od alergija tipa I
- ▶ Rukavice su prikladne za svaki kontakt s hranom

MEDICINSKI PROIZVOD	2017/745	I. KLASE	EN 455	AQL 1.5
PPE	2016/425	KATEGORIJA III	EN 374	AQL 1.5

- ▶ 100 kom po kutiji
- ▶ 10 kutija po velikom kartonu
- ▶ 600 kutija po paleti

OSNOVNE INFORMACIJE

Veličina	Širina dlana	Ukupna dužina	Debljina		
			Dlana	Mašeta rukavice	Prst
XS 5-6	75 ± 5 mm	240 mm	Min 0.08 mm	Min 0.07 mm	Min 0.10 mm
S 6-7	85 ± 5 mm				
M 7-8	95 ± 5 mm				
L 8-9	110 ± 5 mm				
XL 9-10	120 ± 5 mm				
XXL 10-11	130 ± 5 mm				

KAKO NAVUČI JEDNOKRATNE RUKAVICE

KAKO ISPRAVNO SKINUTI JEDNOKRATNE RUKAVICE

UPUTE ZA SKLADIŠTENJE

Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti, izvorima ozona ili izvorima plamena. Čuvati na suhom i hladnom mjestu, na temperaturi od 5-38°C. Nemojte držati u neposrednoj blizini otapala, ulja, goriva i maziva.

ZBRINJAVANJE


Zbrinite u skladu s važećim zakonima i propisima.

SIMBOLI KORIŠTENI NA AMBALAŽI


Proizvođač



Datum proizvodnje



Granična vrijednost temperature



Pogledajte upute za upotrebu



Lot broj / broj serije



Datum isteka



Samo za jednokratnu upotrebu



Ambalaža se može reciklirati



Broj proizvoda



Čuvati na suhom



Nije sterilno



Ova strana treba biti okrenuta prema gore



Medicinski proizvod



Držite podalje od sunčevog svjetla



Priladno za kontakt s hranom



Oprez pri rukovanju



UAB Kasko Group | Kid-Man®
A.Vivulskio str. 12D, 03221, Vilnius, Litva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Uvoznik / distributer za Rumunjsku: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman Nr 2-2A, Braila Tel: +40 753 660066

Proizvedeno u Kini
Dizajnirao Kid-Man®

Objavila UAB Kasko Group | Kid-Man®

Datum zadnjeg ažuriranja 2026-01-05

