

## **Naudojimo ir priežiūros instrukcija**

### **DAUGIAFUNKCIS NEIĞALIOJO VEŽIMĖLIS STEELMAN SUPERB**

04-055-3



Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo ir priežiūros instrukciją!

**TURINYS**

Pratarmė/Paskirtis ir savybės/Bendros pastabos .....	3
Instrukcijoje naudojami simboliai/Pakuotės turinys .....	4
Komplektuojančios dalys.....	6
Naudojimas .....	7
Saugumas .....	9
Transportavimas/Priežiūra/ Atsarginės dalys.....	13
Rankų atramos/Stabdžiai .....	14
Būgniniai stabdžiai/Kojų atramos .....	15
Galiniai ratai/Apsauga nuo apsvertimo .....	16
Sėdynės aukščio keitimas/Apsauga nuo apsvertimo .....	16
Sėdynės ir nugaros kampo keitimas .....	17
Galvos atrama/Sėdynės gylio keitimas .....	18
Šoninės atramos/Abduktoriaus veikimas .....	19
Garantijos sąlygos .....	20
Specifikacijos .....	21
Garantinė kortelė.....	24

## PRATARMĖ

Gerbiamas Kliente, nuoširdžiai dėkojame įsigijus Kid-Man vežimėlį. Kiekvienas vežimėlis, prieš palikdamas gamyklą patikrinimas, todėl Jus pasiekia tik kokybiškas gaminys.

## PASKIRTIS IR SAVYBĖS

Skirtas naudoti asmenims, turintiems sunkią negalią. Vežimėlį galima naudoti tiek patalpoje, tiek ir lauke.

## BENDROS PASTABOS

- Neįgaliojo vežimėlis SteelMan Superb yra pristatomas kartoninėje dėžėje, jau paruoštas naudojimui. Išpakavę vežimėlį, išsaugokite jam skirtą dėžę. Jos gali prireikti vežimėlio laikymui ar grąžinimui. Gavę vežimėlį, patikrinkite ar nėra padarytų pažeidimų transportavimo metu. Jei pastebėjote padarytą žalą, tuoj pat praneškite įmonei, kuri atliko transportavimą. Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos vežimėlio dalys, kitu atveju, praneškite pardavėjui.
- Jūsų turimo vežimėlio tipas nurodytas lipduke, užklijuotame ant porankio bei ant metalinės kryžmės, esančios po vežimėlio sėdyne. Apvalus lipdukas su skaičiumi (pvz. 38) nurodo, kad vežimėlio sėdynės (sėdimosios dalies) plotis yra 38 cm.

## INSTRUKCIJOJE NAUDOJAMI SIMBOLIAI



**Dėmesio!** Šiuo ženklu pažymėtos vietos instrukcijoje, kuriose ypatingas dėmesys skiriamas Jūsų saugumui. Prašome įdėmiai perskaityti rekomendacijas saugumui.

## PAKUOTĖS TURINYS

1. 1 x vežimėlis
2. 1 x sėdynė
3. 1 x nugaros atrama
4. 1 x pora pakojų
5. 1 x pompa
6. 1 x naudojimo instrukcija
7. 1 x reguliavimo įrankių rinkinys
8. 1 x abduktorius
9. 2 x šoninės atramos



**Kid-Man** EN XXXXXXXXXXXX 1  
LT XXXXXXXXXXXX  
LV XXXXXXXXXXXX  
RO XXXXXXXXXXXX

2 REF XX-XXX-X 3

**ART. NAME XXXXX**

3 **SN(UDI)** (XX)XXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXX(XX)XXXX

5 20XX / XX

6

7 **UDI** XXXXXXXX

7

4 **MD** **MAX** **3200** **i** **A** **CE**

UAB Kasko Group | Kid-Man®  
A.Vivulskio str. 12D, 05221, Vilnius, Lithuania  
Tel. +370 5 265 0000 | www.kid-man.com  
Made in | Pagaminta | Razots | Facut in - XX

1. Pavadinimas
2. Modelis
3. Sėdynės plotis
4. Maksimali apkrova
5. Gamintojas
6. Kontaktiniai duomenys
7. Serijos numeris

**KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS**


1. Nugaros atrama
2. Priekinis ratas
3. Porankis
4. Pakojų fiksavimo mechanizmas
5. Pakojai
6. Galinis ratas
7. Šoninės atramos
8. Stabdžio svirtis
9. Stūmimo rankenos
10. Galvos atrama
11. Abduktorius
12. Priemonė nuo apsivertimo
13. Galvos atramos laikiklis



•**Įspėjimas!** Dėl nuolatinio produkto tobulinimo, Jūsų įsigyto vežimėlio komplektacija gali šiek tiek skirtis nuo naudojimo instrukcijoje aprašytos vežimėlio komplektacijos.

## NAUDOJIMAS


Tinkamam ir saugiam vežimėlio naudojimui, rekomenduojame naudotis šiomis instrukcijomis. Vežimėlis buvo suprojektuotas užtikrinti stabilumą. Kiekvienas vežimėlio judesys yra veikiamas gravitacijos, todėl yra būtina užtikrinti, kad vežimėlis neapvirstų. Didėsiam saugumui užtikrinti, naudokite saugos diržus.

## DAIKTŲ SIEKIMAS SĖDINT VEŽIMĖLYJE

Siekiant daiktų, tik rankos gali išsikišti už vežimėlio ribų. Kūnas ir galva turi likti vežimėlyje tam, kad vežimėlis neapvirstų. (Pav. Nr. 2)



Pav. Nr. 2

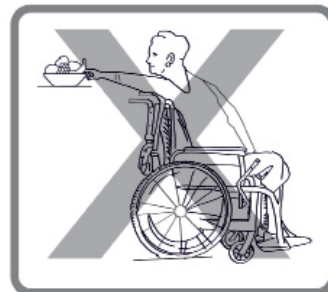


## PERSIKĖLIMAS ANT ŠALIGATVIO

Rekomenduojame persikeliant ant šaligatvio turėti asistentą, kuris padės atlikti šį veiksma. Pirma, padėjėjui atsistojus prie stūmimo rankenų, vežimėlį pristumti prie šaligatvio krašto. Kilstelėjus, užkelkite priekinius ratus ant šaligatvio. Pastumkite vežimėlį ir užkelkite galinius ratus. (Pav. Nr. 3)



Pav. Nr. 3

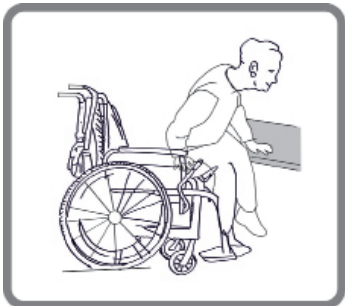**PERSIKĖLIMAS**

Pav. Nr. 4

Jei esate pakankamai stiprus, persikelti galite savarankiškai. Pirmą, pristumkite vežimėlį kuo arčiau vietos, į kurią ketinate persėsti. Užfiksukite stovėjimo stabdžius ir pasirėmę į sėdimą vietą, lėtai perkelti savo kūną. (Pav. Nr. 4) Jei nėra pakankamos atramos persikėlimui, naudokite persikėlimo lentą. Jei esate pakankamai stiprus, kad atsistotumėte, tai persikelti galite tokiu būdu. Jei turite judėjimo problemų, persikeldami paprašykite pagalbos iš artimųjų. Persikeldami, niekada neatsistokite ant pakuojų.




**LAIPTAI**

Norint užkilti laiptais, patariame turėti du pagalbininkus, vieną vežimėlio priekyje, kitą gale. Priekyje esantis žmogus paverčia vežimėlį atgal, tačiau išlaiko balansą. Kilstelėjęs, žengia pirmą žingsnį. Gale esantis žmogus atkartoja pirmojo veiksmus, taip pat išlaikydamas balansą, kad sėdintysis neiškristų. Abu pagalbininkai nepaleidžia vežimėlio tol, kol vežimėlis abiem ratais nėra pastatytas ant lygaus paviršiaus. Tie patys veiksmai yra kartojami, norint nusileisti laiptais žemyn. (Pav. Nr. 5)



Pav. Nr. 5

## VAŽIAVIMAS ĮKALNE/NUOKALNE

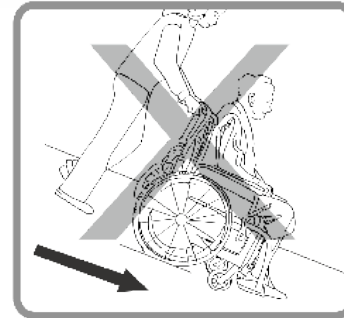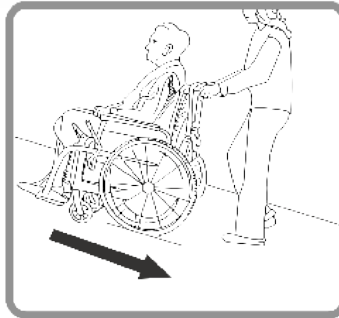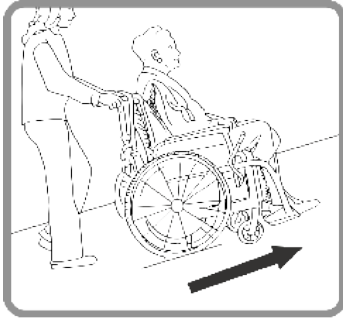

## SAUGUMAS



- Pasirinkite saugų greitį važiuodami nuolydžiu. Venkite važiuoti vežimėliu stačiais šlaitais. Nesinaudokite keltuvais. Nevažiuokite atbulomis nuo kalno.
- Vežimėlis skirtas tik vieno asmens naudojimui.
- Laikykite kojas ant kojų atramų, kuomet važiuojate. Nestovėkite ant kojų atramų. Vežimėlyje sėdėkite tiesiai, laikykite pusiausvyrą. Rekomenduojama, kad kūno svorio centras nepasislinktų nuo vežimėlio sėdimosios dalies.
- Rekomenduojame pasitarti su savo gydančiu specialistu, kaip persikelti iš/į vežimėlį. Stovėjimo stabdys privalo būti įjungtas sėdantis į vežimėlį ar keliantis iš jo. Vežimėlio stovėjimo stabdys nepritaikytas vežimėlio greičio mažinimui, jį galima įjungti tik vežimėliui visiškai sustojus.
- Būkite atidūs naudodamiesi vežimėliu, saugokitės buityje esančių kliūčių, tokių kaip: siauros durys, laipteliai, namų apyvokos daiktai, vaikų žaislai ir kt. Nesiekite daiktų, esančių toliau, nei siekia Jūsų ranka.



• **Įspėjimas!** Nekelkite vežimėlio laikydami už nuimamų dalių. Tokie veiksmai gali sužaloti vartotoją arba sugadinti vežimėlį.



• **Įspėjimas!** Draudžiama važiuoti apledėjusia įkalne ar nuokalne.



• **Įspėjimas!** Draudžiama važiuoti per smulkias kliūtis ir kelio nelygumus. Draudimo nepaisymas gali sukelti vartotojo kūno sužalojimą ar sugadinti vežimėlį.



• **Įspėjimas!** Draudžiama palikti vežimėlį įkalnėje ar nuokalnėje ar bet kurioje kitoje vietoje, kur jis trukdytų praeiviams ar keltų jiems grėsmę.



• **Įspėjimas!** Draudžiama stabdyti vežimėlį leidžiantis nuokalne. Toks stabdymas gali baigtis vežimėlio virtimu ir kūno sužalojimu.



• **Įspėjimas!** Vežimėlio remontas, valymas ar reguliavimas turėtų būti atliekami serviso meistro, asmeniui nesėdint vežimėlyje.



• **Įspėjimas!** Draudžiama vežimėliu naudotis asmenims, sveriantiems daugiau, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.



• **Įspėjimas!** Nepalikite vežimėlio prie karščio šaltinio. Didesnė nei +40°C gali įkaitinti vežimėlio dalis, kurios gali nudeginti.

## PAGAVOS PAVOJUS



Atliekant bet kokią manipuliaciją su vežimėliu, pavyzdžiui, jį surenkant, juo judant arba reguliuojant tam tikra dalis, yra pavojus prispausti pirštus. Prašome atlikti minėtas manipuliacijas neskubant ir atsargiai. Sureguliuvus vežimėlio dalis, prašome nedelsiant priveržti varžtus.

## NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO PAKĖLIMAS



Prieš perkeliant vežimėlį įsitikinkite, kad visos nuimamos dalys yra nuimtose. Vežimėlyje nuimamos dalys yra rankų bei kojų atramos, galiniai ratai ir sėdynės bei nugaros atramos, abduktorius, šoninės krūtinės atramos. Kaip šias dalis nuimti, skaitykite atitinkamuose šios instrukcijos punktuose. Įsitikinę, kad nuimtose visos dalys, vežimėlį laikykite abejomis rankomis už vežimėlio rėmo.

## PADANGOS



Priekiniai vežimėlio ratukai yra vientisos masės (monolitiniai). Galiniai ratai yra pripučiami. Rekomenduojamas oro slėgis nurodytas ant padangos. Saugumui užtikrinti, periodiškai tikrinkite oro slėgį galinėse padangose. Jeigu slėgis per mažas, pripūskite padangas naudodami pridėtą pompą. Pastebėję, kad padangose oras nesilaiko ar ji susidėvėjo, nedelsdami praneškite serviso įmonei. Vežimėlio naudojimas, kai galinės padangos yra tuščios, griežtai draudžiamas!

## UŽSPRINGIMO PAVOJUS



Prašome neleisti vaikų, jaunesnių kaip penkeri metai, prie vežimėlio, Kadangi vežimėlyje naudojamos smulkios dalys, vaikas gali jas nuryti ar paspringti.

## VALYMAS IR DEZINFEKCIJA



Plieninio rėmo ir plastmasinių dalių valymui naudokite drėgną šluostę. Įsisenėjusiems nešvarumams pašalinti, galima naudoti neagresyvius valiklius. Ratams nuvalyti galima naudoti drėgną sintetinio pluošto šepetį (draudžiama naudoti šepetį su metaliniais šeriais). Sėdynės ir nugaros atramas galima nuimti ir skalbti skalbimo mašinoje naudojant įprastus skalbiklius ar dezinfekavimo priemones. Jeigu nesate tikras, kokios priemonės yra tinkamos, prašome kreiptis į pardavėją.

## VEŽIMĖLIO NAUDOJIMAS KITO ASMENS



Vežimėliu gali naudotis kitas asmuo. Prieš vežimėlį perduodant kitam asmeniui, būtina jį kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti. Išvalius vežimėlį, jo techninė būklė privalo būti patikrinta serviso specialisto, o nusidėvėjusios dalys pakeistos naujomis.

## IŠMETIMO NURODYMAI



Tikėtina vežimėlio tarnavimo trukmė, laikantis saugumo ir priežiūros rekomendacijų, yra 5 metai. Vežimėliui susidėvėjus, jis turi būti perdirbamas. Negalima vežimėlio mesti kartu su buitinėmis atliekomis. Norėdami tinkamai perdirbti savo vežimėlį, prašome kreiptis į jus aptarnaujančią atliekų perdirbimo įmonę ar pardavėjo servisą.

## TRANSPORTAVIMAS



- Norint užtikrinti saugų vežimėlio transportavimą ir apsaugoti nuo žalos, nuimamos dalys (porankiai, pakojai, galiniai ratai) turi būti pašalintos.

## PRIEŽIŪRA



- Kaskart prieš naudodamiesi vežimėliu, patikrinkite stovėjimo stabdžius.
- Vežimėlis turi būti laikomas sausoje aplinkoje, vengiant tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo dulkių apklojant arba periodiškai valant. Būtinai reguliarius valymas buitines paskirties valikliais ir šiltu vandeniu. Draudžiama naudoti agresyviuos valiklius, kurie gali pažeisti paviršių.
- Vežimėlis turi būti reguliariai tikrinamas, taip užtikrinant naudotojo saugumą ir patogumą. Nusidėvėjusios vežimėlio dalys, kurios nebetinkamos ar nesaugios naudoti (sėdynės ir nugaros atramos, ratai), privalo būti pakeistos naujomis.

## ATSARGINĖS DALYS



- Tik gamintojo originalios dalys gali būti naudojamos atliekant vežimėlio remontą. Norėdami gauti originalią dalį, pateikite lipduke nurodytą vežimėlio tipą ir serijos numerį, prekybos vietoje ar susisiekiate tiesiogiai su gamintoju. Gamintojas bei pardavėjas neatsako už žalą, patirtą naudojant ne originalias atsargines dalis ar atliekant remonto darbus neautorizuotoje vietoje.

## RANKŲ ATRAMOS



Pav. Nr. 1

Vežimėlio rankų atramos yra paminkštintos, reguliuojamo aukščio ir/arba nuimamos. (Pav. Nr. 1) Norėdami pakelti rankų atramą, pilnai nuspauskite plastmasinį laikiklį ir patraukite atramą į viršų. Rekomenduojame atramą pakelti sėdantis į/iš vežimėlio iš šono. Važinėjant rankų atrama turi būti fiksuota.

## STABDŽIAI



Pav. Nr. 2

Vežimėlis turi stabdžius abejose vežimėlio pusėse. Stovėjimo stabdžiai įjungiami ar išjungiami naudojantis specialia rankenėle sumontuota abejose vežimėlio pusėse. (Pav. Nr.2) Norėdami įjungti stovėjimo stabdį, traukite rankenėlę į save. Norėdami išjungti stovėjimo stabdį ir judėti, rankenėlę palenkite į savo pusę. Didesniam saugumui, rekomenduojame visada įjungti abu stabdžius vienu metu. Dėl įprastinio dėvėjimosi gali sumažėti galinio rato stabdymo efektyvumas. Siekiant užtikrinti tinkamą stabdymą, turite pakeisti stabdžių poziciją. Norėdami tai atlikti, pridėtu įrankiu atsukite 2 varžtus, esančius apatinėje stabdžių dalyje. Šiek tiek pastumkite stabdžius į priekį ar atgal ir vėl pritvirtinkite varžtus.

## BŪGNINIAI STABDŽIAI



Pav. Nr. 3

- Stelman Superb vežimėlyje sumontuoti būgniniai stabdžiai, skirti lydinčiam asmeniui sulėtinti vežimėlio greitį (ypač leidžiantis nuokalne) arba visiškai užblokuoti galinius ratus. Stabdžių rankenėlė sumontuota ant stūmimo rankenos. (Pav. Nr. 3) Norėdami sulėtinti vežimėlį, abejomis rankomis vienu metu nuspauskite stabdžių rankenėlę į viršų. Norėdami pilnai užfiksuoti galinius ratus, kai stabdžių rankenėlė viršutinėje padėtyje, nulenkite žemyn laikiklį, esantį žemiau stabdžių rankenėlėje. Galinio rato stabdymo intensyvumas reguliuojamas skirtingai įtempiant stabdžio trosą. Stabdymo stiprumas tuo didesnis, kuo labiau atpalaiduotas trosas įtempimo varžtas.

## KOJŲ ATRAMOS



Pav. Nr. 4

- Kojų atramos reguliuojamo kampo ir ilgio su paminkštinomis blauzdų atramomis. (Pav. Nr.4)
- Pakojai yra supakuoti į nedidelę kartoninę dėžę. Prieš įstatydami išpakuokite iš dėžės. Pakojai tvirtinami vežimėlio priekyje. Pirma, įstatykite plastikinę dalį į metalinį skersinį. Stumkite pakojį tol, kol išgirsite pokštelėjimą. Nesumaišykite dešiniojo ir kairiojo pakojų! Prieš suskleidžiant vežimėlį, pakojai turi būti užlenkti į viršų arba nuimti. Patraukite plastikinę rankenėlę, pasukite pakojį į šoną ir, patraukę į viršų, nuimkite. Pakojų aukštis gali būti reguliuojamas pagal poreikius. Pirma, atsukite ir nuimkite varžtą, naudodami pridėtą raktą. Nustatykite reikiamą aukštį ir prisukite varžtą.

## GALINIAI RATAI



Pav. Nr. 5

Galiniai ratai tvirtinami greitos fiksacijos ašimi. Norėdami nuimti ratą, viena ranka stabiliai laikykite vežimėlį, kita paimkite ratą ir nuspauskite rato centre esančią ašį. (Pav. Nr. 5) Laikydami nuspaustą ašį, traukite ratą į save. Norėdami uždėti nuimtą ratą, pakartokite veiksmus atgagine tvarka.

## APSAUGA NUO APSIVERTIMO



Pav. Nr. 6

Steelman Superb vežimėlis aprūpintas apsauga nuo apsvertimo. (Pav. Nr. 6) Apsauga sumontuojama ant vežimėlio gamykloje, todėl Jums nereikės jos instaliuoti. Ši priemonė iki minimumo sumažina riziką sėdinčiam asmeniui apsvirti, ypač kai važiuojama įkalne ar įveikiant kelio nelygumus. Optimaliai apsaugai užtikrinti, nustatykite apsauginius ratukus tinkamame aukštyje. Viena ranka patraukite pilką metalinį žiedą į save ir tuo pat metu kita ranka nustatykite ratuką norimame aukštyje. Jeigu norite nuimti apsaugą nuo apsvertimo, atsukite laikantį varžtą ir patraukite plastikinį rėmą į save.

## SĖDYNĖS AUKŠČIO KEITIMAS



Pav. Nr. 7

Dėl priekinių ir galinių ratų atramos, galite keisti sėdynės aukštį. (Pav. Nr. 7) Norėdami pakeisti priekinio rato aukštį, atsukite varžtą, esantį rato šakutėje, pakelkite ar nuleiskite ratą ir vėl pritvirtinkite varžtu. Norėdami pakeisti galinio rato aukštį, atsukite 2 varžtus, nustatykite reikiamą aukštį ir įtvirtinkite galinio rato adapterį 2 varžtais. Įsidėmėkite, keičiant galinio rato adapterio aukštį, galinis ratas turi būti nuimtas. Rekomenduojame, keičiant aukštį, nustatyti vienodą priekinių ir galinių ratų aukštį. Galinis ratas perstatomas vertikaliai ir horizontaliai, naudojant įrankius.

## SĖDYNĖS IR NUGAROS KAMPO KEITIMAS



Pav. Nr. 8

Dujinių spyruoklių pagalba pakeisite sėdynės ir nugaros kampus. Sėdynės posvyrio kampas reguliuojamas iki 20<sup>o</sup>, nugaros kampas iki 30<sup>o</sup>. Šios funkcijos valdomos svirtelėmis, sumontuotomis ant stūmimo rankenų. (Pav. Nr. 8).

## GALVOS ATRAMA



Pav. Nr. 9

Vežimėlis turi reguliuojamą galvos atlošą, kurį galima individualiai pritaikyti tiek vertikaliai, tiek horizontalia kryptimis. (Pav. Nr. 9)

Norėdami pakeisti galvos atramos padėtį atlaisvinkite laikiklį, nustatykite galvos atramą pasirinktoje padėtyje bei fiksokite.

Galvos atramos kampas (gylis), keičiamas lankstų pagalba, reguliavimo įrankiu, kurį gaunate vežimėlio komplektacijoje.

## SĖDYNĖS GYLIO IR PLOČIO KEITIMAS



Sėdynės gylis reguliuojamas ir fiksuojamas pasirinktoje padėtyje 40-50 cm intervale. Norėdami pakeisti sėdynės gylį, nuimkite sėdynės paminkštinimą ir atlaisvinkite du varžtus esančius po sėdyne, laikydami sėdynę viena ranka, kita ranka patraukite sėdynę į priekį ir fiksokite norimoje padėtyje.

Sėdynės plotis gali būti padidintas nuo 44 cm iki 49 cm patraukus rankų atramas į šonus (kiekviena rankų atrama atitraukiama po 2,5 cm).

Norėdami padidinti sėdynės plotį, atsukite varžtą esantį po rankų atrama ir patraukite rankų atramą į išorę bei fiksokite. Tą patį padarykite su kita atrama. Rekomenduojama naudoti atramas nustatytas tolygiai.

## ŠONINĖS ATRAMOS



Pav. Nr. 9

Šoninės atramos tvirtinamos pasirinktoje padėtyje, nugaros atramos rėme iš abiejų pusių (Pav. Nr. 9). Individualiai pritaikomos pagal vartotojo poreikius, reguliuojant atramos ilgį bei kampą. Patogiai pasukamos 180° norit išlipti per šoną.

## ABDUKTORIAUS VEIKIMAS



Pav. Nr. 8

Apduktorius tvirtinamas priekinėje vežimėlio dalyje. Reguluojamas horizontalia ir vertikalia kryptimis. Individualiai pritaikomas pagal vartotojo poreikius.

Apduktorius reguliuojamas įrankių pagalba, kurie pridėti vežimėlio komplektacijoje.

## GARANTIJOS SĄLYGOS

• Priemonei suteikiama 24 mėnesių garantija (išskyrus priekinius ir galinius ratus) nuo įsigijimo dienos. Gamintojas bei platintojas prisiima atsakomybę tik dėl defektų, kurie atsirado tiesiogiai dėl gaminimo proceso ar netinkamos kokybės medžiagų.

Gamintojas bei platintojas nepriima atsakomybės dėl defektų:

- atsiradusių naudojant gaminį ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo ir priežiūros instrukcijų;
- atsiradusių naudojant ne originalias gamintojo detales ar taisant priemonę gamintojo neapbruotoje vietoje;
- atsiradusių dėl gamtos stichijų ar naudotojo kompetencijos stokos ir neatsargumo.

Garantija galioja tik su užpildyta garantine kortele. Įvertinęs prekės gedimą, UAB „Kasko Group“ atstovas informuoja, ar gedimas garantinis. Jei gedimas garantinis, UAB „Kasko Group“ nusprendžia, ar sutaisyti prekę, ar pakeisti ją nauja. Prekės sutaisymas garantinio periodo nepratęsia.

Garantinio aptarnavimo terminas – 4 savaitės nuo prekės gavimo UAB „Kasko Group“. Jeigu prekės remontas nėra garantinis, visas remonto išlaidas apmoka pirkėjas.

### SPECIFIKACIJOS

Sėdynės plotis	390 mm	440 mm	490 mm
SteelMan Superb	04-055-3/39	04-055-3/44	04-055-3/49
Bendras ilgis	1006 mm		
Sėdynės plotis	39 + 5 cm / 44 + 5 cm / 49 + 5 cm		
Bendras aukštis	106 cm		
Sėdynės gylis	40+10 cm		
Sėdynės aukštis	51 cm		
Nugaros atramos aukštis	56 cm		
Pakojų ilgis	33-57 cm		

Porankių aukštis nuo sėdynės pagrindo	270-335 mm
Priekinių ratų dydis	200 x 30 mm
Galinių ratų dydis	610 x 35 mm
Svoris	~ 43 kg
Maksimali apkrova	135kg
Rėmas	Plienas
Apmušalas	Polisteris dengtas poliuretanu



**GARANTINĖ KORTELĖ**

Prekės pavadinimas	Modelis	Pardavimo data (įrašyti)	Garantinis terminas
Daugiafunkcis neįgaliojo vežimėlis	<input type="checkbox"/> 04-055-3/39 <input type="checkbox"/> 04-055-3/44 <input type="checkbox"/> 04-055-3/49		24 mėnesiai

Place for SN

Your dealer

Išleido:

UAB Kasko Group  
A.Vivulskio 12D, Vilnius, Lithuania  
Tel. +370 5 265 0000  
[www.kid-man.com](http://www.kid-man.com) • [info@kid-man.com](mailto:info@kid-man.com)

Data 2019-03-18

Paskutinio atnaujinimo data 2019-03-18

