



ALLMOBILITY TRADING S.r.l.

Veiklos vykdymo adresas: Via G. Balla, 4 42124 Reggio Emilia (RE) – ITALIJA

Buveinės adresas: Via Mentana, 150 43100 Parma (PR) – ITALIJA

Tel. 0522-941078

El. paštas: info@allmobility.it

Svetainė: www.allmobility.it

„BUFFALO 150“ LENTA

PAGALBA PERKELIANT NAUDOTOJĄ



Gaminys atitinka Direktyvos 2007/47/EB reikalavimus

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
001-16 versija

TURINYS

1. GAMINIO APRAŠYMAS.....	3
2. TECHNINIAI DUOMENYS.....	3
3. BENDRA INFORMACIJA.....	4
4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS.....	5
5. ŠALINIMAS.....	7
6. GARANTIJA – PAGALBA.....	7

1. GAMINIO APRAŠYMAS

Šiose instrukcijose aprašytas gaminys yra lengvai slystanti sintetinio pluošto lenta, skirta vartotojui perkelti. Ji sukurtas taip, kad būtų lengvai gabenama, iš tikrųjų ji yra tik 4 mm storio ir turi rankenos skylę.

BUFFALO 150 lenta yra ryškių spalvų ir turi dvi įpjovas, kad būtų užtikrintas didesnis stabilumas ir maksimalus saugumas perkėlimo metu.

Sudėtinis pluoštas užtikrina didelį atsparumą ir leidžia išvengti kenksmingo paviršiaus skilinėjimo, kuris laikui bėgant pažeidžia kitas medžiagas.

BUFFALO 150 lenta yra pagalbinė priemonė, pasižyminti lankstumu ir naudojimo universalumu.

Ją galima lengvai naudoti nedideliems perkėlimams bet kokioje patalpų aplinkoje, pavyzdžiui, miegamajame, svetainėje, virtuvėje ar vonios kambaryje; arba lauke, pavyzdžiui, automobilyje, ant suolo ar kėdės, norint perkelti nuo neįgaliojo vežimėlio ar ant jo.

Iliustracijos:



2. TECHNINIAI DUOMENYS

„BUFFALO 150“ LENTA

MATMENYS	SVORIS (kg)	KELIAMOJI GALIA (kg)
<p>↔ 77 cm</p> <p>↗ 32,5 cm</p> <p>↕ 0,4 cm</p> <p>ILGIS = 77 cm</p> <p>PLOTIS = 32,5 cm</p> <p>STORIS = 0,4 cm</p>	1,23	150
		<i>paskirstyta per 40 cm ilgio paviršių, šonuose 25 kg ramybės svoris</i>

LAIKYMO TEMPERATŪRA

LEISTINAS TEMPERATŪROS DIAPAZONAS:

ŽEMIAUSIA = -5 °C

AUKŠČIAUSIA = +40 °C

3. BENDRA INFORMACIJA

Lenta buvo sukurta ir pagaminta taip, kad ją būtų saugu naudoti pagal paskirtį, jei ji naudojama ir laikoma taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.

Toliau pateikiamos pagrindinės naudojimo ir teisingo laikymo instrukcijos, kad būtų sumažinta rizika.



ATKREIPKITE DĖMESĮ!



DRAUDŽIAMAS VEIKSMAS



Lenta yra pagalbinių medicininė priemonė, palengvinantis neįgalaus vartotojo perkėlimą iš neįgaliojo vežimėlio į kitą sėdynę.

NENAUDOKITE LENTOS JOKIEMS KITIEMS TIKSLAMS, IŠSKYRUS APRAŠYTUS 2 SKYRIUJE.



NENAUDOKITE LENTOS, JEI JOJE YRA KOKIŲ NORS PAŽEIDIMO, DEFORMACIJŲ, ĮTRŪKIMŲ, SUPLONĖJIMO, LŪŽIŲ POŽYMIŲ.



NENAUDOKITE LENTOS SUNKESNIEMS NEI DIDŽIAUSIA LEISTINA LAIKOMOJI GALIA (150 KG) SVORIAMS / ASMENIMS.



LENTAI VALYTI NENAUDOKITE KOROZIJĄ KELIANČIŲ PRODUKTŲ. VALYMIUI REIKIA TIK DRĖGNO AUDINIO, CHIRURGINIO SPIRITO AR PARASTO MUILO.



VADOVAUKITĖS ANT LENTOS IR 4 SKYRIUJE PATEIKTOMIS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOMIS.



ĮSITIKINKITE, KAD ATSTUMAS IKI PERKĖLIMO VIETOS YRA IDEALUS, KAD BŪTŲ GALIMA TEISINGAI IR STABILIAI PADĖTI LENTĄ.



KAI ĮMANOMA, LENTĄ PRIKABINKITE IR PRIE NEĮGALIŲJŲ VEŽIMĖLIO RANKOS ATRAMOS, IR PRIE ATRAMOS PERKĖLIMO VIETOJE.



JEI ANT LENTOS UŽKLIJUOTOJE ETIKETĖJE INSTRUKCIJOS YRA TAIP NUSIDĖVĖJUSIOS, KAD JŲ NEBĖJMANOMA PERSKAITYTI, PAPRAŠYKITE GAMINTOJO NAUJOS ETIKETĖS.

4. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

BUFFALO 150 lenta yra atrama, skirta vartotojui perkelti iš vežimėlio į kitą vietą, pavyzdžiui, ant lovos, sofos, į automobilį ir pan.

Lenta neturi jokios pakuotės, todėl yra perkama, naudojama, laikoma ir nešiojama tokia, kokia yra.

Toliau yra pateikiama keletas dažniausių naudojimo būdų ir kaip juos atlikti, kaip parodyta ir ant lentos užklijuotoje etiketėje.




PERKĖLIMAS Į AUTOMOBILĮ

Privažiukite kuo arčiau automobilio sėdynės, pritvirtinkite lentą prie neįgaliojo vežimėlio atramos ir įsitinkinkite, kad ji tvirtai atsiremia į sėdynę.



PERKĖLIMAS Į LOVĄ

Privažiukite kuo arčiau lovos, pritvirtinkite lentą prie neįgaliojo vežimėlio atramos ir įsitinkinkite, kad ji tvirtai atsiremia į čiužinį.

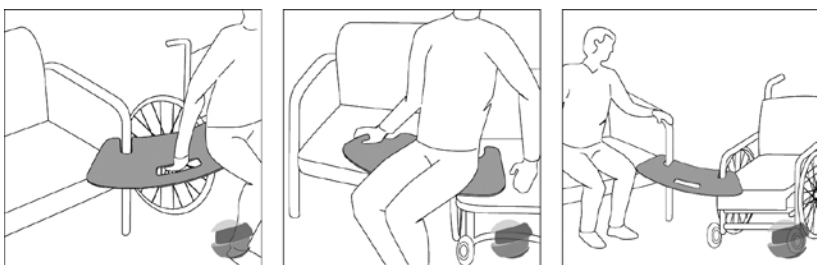

PERKĖLIMAS ANT KĖDĖS / ANT SOFOS

Privažiukite kuo arčiau kėdės/sofos, pritvirtinkite lentą prie neįgaliojo vežimėlio atramos ir prie kėdės / sofos atramos (jei įmanoma), ir užtikrinkite, kad ji tvirtai remiasi į sėdynę.



PERKĖLIMAS ANT KLOZETO

Privažiukite kuo arčiau klozeto, pritvirtinkite lentą prie neįgaliojo vežimėlio atramos ir užtikrinkite, kad ji tvirtai remiasi į sėdynę..

VISADA VYKDYKITE 3 SKYRIAUS INSTRUKCIJAS.

5. ŠALINIMAS

Kai lenta nebebus naudojama, išmeskite ją teisingai, neteršdami aplinkos.

Laikykitės šalinimo taisyklių, galiojančių naudojimo vietoje (teiraukitės vietinių įgaliotų atliekų tvarkymo įmonių).

6. GARANTIJA – PAGALBA

Žemiau pateikiamos bendrosios garantijos sąlygos, kurias taiko gamintojas **ALLMOBILITY TRADING S.r.l.**

Garantija taikoma visiems gamybos ir medžiagų defektams, tinkamai patvirtintiems bendrovės nuožiūra.

Garantija neapima žalos, kurią sukelia:

- *Normalus nusidėvėjimas*
- *Grynai estetines funkcijas turinčių dalių pablogėjimas*
- *Neįgaliotų asmenų ar centrų atlikti remonto ar modifikavimo darbai*
- *Gaminio naudojimas nesilaikant šiame vadove pateiktų įspėjimų*
- *Žalos, kurią sukelia netinkama aplinka, kurioje naudojamas gaminys, ir reiškiniai, nepriklausantys nuo įprasto jo veikimo.*

Garantija galioja 1 (vienerius) metus po pardavimo.

Jei iškyla kokių nors problemų ar prireikia informacijos, susisiekite su gamintoju pirmame puslapyje nurodytais adresais.

7. **BUFFALO GRIP 150 VERSIJA**


BUFFALO GRIP 150 versija (kodas All03 grip) **apačioje turi dvi stipraus sukibimo zonas.**

Jos stabilizuoja lentos galinius paviršius, kai jie liečiasi su minkštomis dalimis, tokiomis kaip kėdės, fotelio, automobilio paminkštinimas ar audinys ar vežimėlio pagalvėlė.

Tai leidžia naudotojams persikelti pagal savo pasirinkimą.

Medžiaga yra „cushion grip“ H3408 s, pagaminta iš 51 % poliuretano ir 49 % poliesterio, su lipniu 1 mm storio akrilo pagrindu.

Forma ir matmenys (mm) parodyti paveikslėlyje.

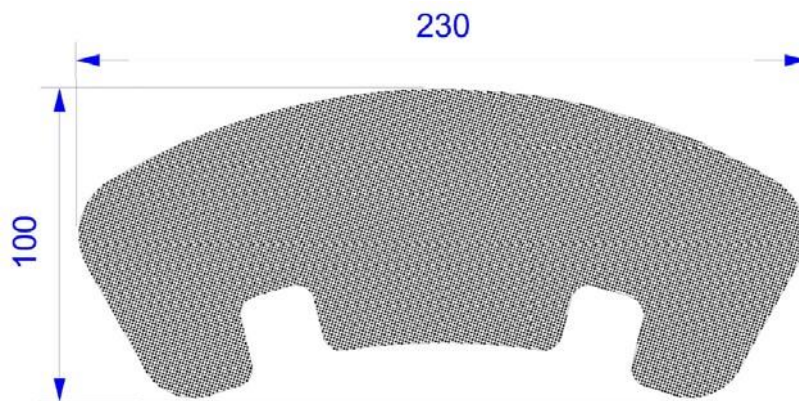

Perkėlimo metu nenaudokite lentos su sukibimą gerinančia medžiaga viršuje (kontakte su kūnu).