



Naudotojo vadovas CONFORM[®] C4 pagalvėlė

CONFORM[®] Med. oro pagalvėlė yra 1-os klasės medicininis produktas (Reg. Nr.: DE/CA/23/051/603NA001.01)



CE deklaracija: Gamintojas deklaruoja, kad CONFORM[®] medicininių pripučiamų pagalvėlių sistema atitinka visus 1 klasės medicinos produktų reikalavimus, kaip nurodyta 2017/745/ES direktyvoje (VIII priedas, III skyrius, 4.1 punktas – 1 reglamentas).

Gamintojas:

„Wolff Kunststoffe GmbH“
Industriestraße 28
69509 Moerlenbach – Vokietija

Atstovas Lietuvoje:

„UAB Kasko Group I Kid-Man™“
A. Vivulskio g. 12D, Vilnius



Pristatymo apimtis

CONFORM® medicininė pripučiamą pagalvėlę pristatoma dėžutėje kartu su užvalkalu, naudotojo vadovu ir pompa.

Numatoma paskirtis

CONFORM® medicininė pripučiamą pagalvėlę sukurta pragulų prevencijai. Ją taip pat galima naudoti kaip pagalbinę priemonę apatinėje kūno dalyje jau esančių žaizdų gydymui. CONFORM® C4 pagalvėlę taip pat padeda sėdėjimo ir padėties stabilizavime.

Ši pagalvėlę sukurta asmenims su ribotomis judėjimo galimybėmis arba tiems, kurie turi nuolat sėdėti (dėl paralyžiaus, įskilo stuburo (spina bifida), insulto, amiotrofinės šoninės sklerozės (ALS), išsėtinės sklerozės (MP)) ar kitų nepaminėtų priežasčių.

Šį gaminį galima naudoti kaip sėdimą paviršių neįgaliojo vėžimėlyje. Pritaikyta naudoti žmonėms.

Wolff Kunststoffe GmbH pagamintą **CONFORM®** medicininę pripučiamą pagalvėlę galite įsigyti

- 3-ijų skirtingų aukščių (5; 7,5; 10 cm)
- 1-os, 2-jų ir 4-ijų kamerų
- 4-ijų kamerų versija su centriniu vožtuvu
- visi standartiniai dydžiai tinka neįgaliojo vėžimėlio sėdėjimo paviršiui (matmenys plotis x gylis)
- taip pat gali būti pagamintos individualiai, pagal pageidavimą

Veikimo principas



Pagalvėlėje yra oro pripildymo vožtuvas. Kadangi pagalvėlės oro kameros yra tarpusavyje sujungtos kanalų sistema, jos sukuria susisiekančią sistemą, tolygiai paskirsto slėgį ir mažina slėgį, kai sėdima ant pagalvėlės. Dėl unikalios kiekvienos kameros žvaigždės formos, pripūtus jos viena kitą stabilizuoja. C4 pagalvėlę galima naudoti kaip 1-os ir/arba 4-ijų kamerų pagalvėlę. Tai priklauso nuo centrinio vožtuvo, esančio pagalvėlės priekyje, padėties (išsamesnę informaciją rasite kitame puslapyje). Pagalvėlės kampuose integruotos metalinės akutės skirtos diržams, kuriais pagalvėlę tvirtinama prie neįgaliojo vėžimėlio.

Naudojimo instrukcija

Informaciją apie naudojimą turi pateikti prižiūrintis personalas, medicinos prietaisų konsultantas, slaugytoja(-s), ergoterapeutas ar kitas kvalifikuotas personalas. Jeigu pagalvėlė buvo gauta ligoninėje naudojimui namuose, tuomet būtina užtikrinti, kad ją naudojantis asmuo ir/arba kiti priežiūroje dalyvaujantys asmenys (šeimos nariai, priežiūrą namuose atliekantys asmenys) būtų supažindinti su tinkamu pagalvėlės naudojimu.


Naudojimo vadovas

Atidarykite reguliatorių ir vožtuvą (pagalvėlė gali būti pripučiama tik tada, kai reguliatorius ir vožtuvas yra atidaryti).

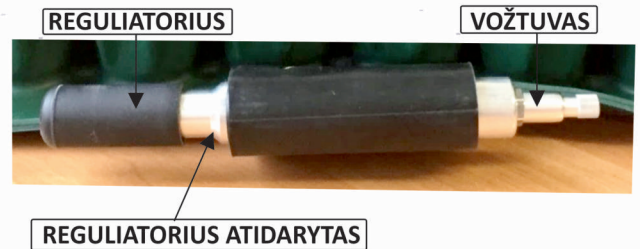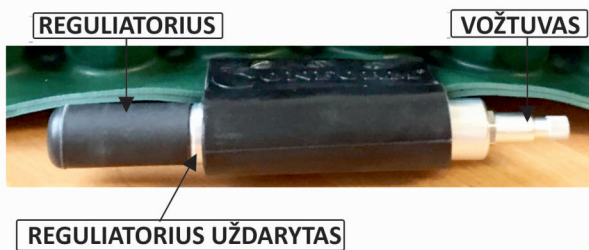

Prijunkite pompos vamzdelį prie pagalvėlės vožtuvo. Sukdami atidarykite reguliatorių ir vožtuvą. Pripūskite pagalvėlę. Uždarykite **vožtuvą** sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Reguliatorius vis dar atidarytas, oras gali laisvai cirkuliuoti kameroje ir zonoje.

Asmuo pasodinamas ant CONFORM® pagalvėlės, nebent pripūtėte pagalvėlę po jau sėdinčiu asmeniu. Dabar jums vėl reikia išleisti orą tam, kad naudotojas kuo giliau įgimztų į pagalvėlę. Norint tai atlikti, turite vėl atidaryti vožtuvą. Jeigu oras išleidžiamas iš pagalvėlės, neleiskite, jog naudotojas uodegikauliu arba klubikaulio gumburu pasiektų apatinę pagalvėlės plokštę.

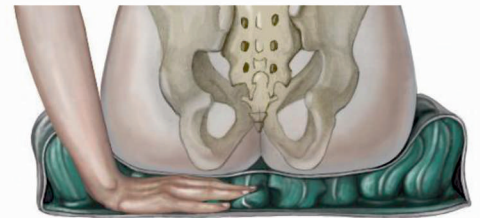

Žemiausia padėtis tarp sėdinčio asmens ir apatinės plokštelės turėtų būti apie 2 cm. Jeigu jūsų ranka telpa likusiame tarpelyje, tai reiškia, jog pagalvėlė yra individualiai pritaikyta naudotojui.

Priklausomai nuo poreikio, pagalvėlė gali būti naudojama su daugiau arba mažiau pripūstomis zonomis, siekiant optimizuoti sėdėjimo padėtį. Norint, kad oro srautas cirkuliuotų visose 4-iose pagalvėlės kameroje, reguliatorius turi būti atidarytas (tačiau, vožtuvas turi būti uždarytas). Prieš pozicionavimą, palaukite kol oras išsiskirstys (apie 10 sekundžių). Dėl kontroliuojamo centrinio vožtuvo, pripūsta pagalvėlė gali tarnauti tiek kaip 1-os ar 4-ių zonų pagalvėlė. Pasirinkę pagalvėlę su 1-a zona, palikite reguliatorių atidarytą.

Išsamus aprašymas, nurodantis skirtumus tarp 1-os ir 4-ių zonų pagalvėlės

Pastaba: dėl vizualinės oro tėkmės demonstracijos, pagalvėlė rodoma be užvalkalų. Naudodami pagalvėlę, visuomet naudokite ir užvalkalą.



Per visą sėdimą paviršių. Dabar pagalvėlė gali būti naudojama kaip **1-os zonos pagalvėlė**.



Kai reguliatorius yra **uždarytas**, oras sulaikomas kiekvienoje iš **4-ių zonų**.

Saugos taisyklės

Apie eksploatacinių savybių pokyčius nedelsiant praneškite gamintojui bei platintojui.

Tarnavimo laikas – Direktyvoje dėl medicinos prietaisų numatyta, kad medicinos prietaisų gamintojas turi nurodyti laikotarpį, kuris vadinamas „saugaus naudojimo laikotarpiu“. Todėl atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, dėl oficialių priežasčių, nurodome, kad šis laikotarpis yra trys metai nuo gaminio įsigijimo datos. Nurodytas laikotarpis nesusijęs su faktiniu galimu naudojimu ar maksimaliu naudotojo naudojimosi laikotarpiu.

Naudojimas - nesėdėkite ant pagalvėlės, jeigu ji yra be užvalkalco. Dėl pagalvėlės struktūros, užvalkalas yra reikalingas tam, kad palaikytų pagalvėlės formą.

Sėdimoji pagalvėlė - viršutinė dalis ir apatinė plokštė - dėdami pagalvėlę ant neįgaliojo vežimėlio įsitikinkite, jog pagalvėlės apatinė plokštė yra ant sėdimosios vežimėlio dalies. Naudotojas sėdi ant viršutinės dalies (kamerų).

Valdymas, jeigu pagalvėlėje yra oro - kartą per dieną reikia patikrinti ar pagalvėlėje yra pakankamai oro. Oro papildymą reikalinga atlikti kas 8-21 dieną.

Pagalvėlės pripūtimo procedūra - prašome pagalvėlę pripildyti oru naudojant pridėtą pompą. Elektrinės pompos gali sukelti per didelį vidinį slėgį ir dėl to pagalvėlė gali sprogti. Vožtuvą atidarinėkite rankomis, o ne replėmis. Naudodami koją nors įrankį, vožtuvą galite sugadinti, sulankstyti ar užkimšti.

Laikymas – produktas pagamintas iš natūralios gumos ir turėtų būti saugomas nuo tiesioginių saulės spindulių (UV spindulių), kurie gali sukelti pirmalaikį medžiagos nusidėvėjimą. Jeigu pagalvėlė nenaudojama, rekomenduojame ją laikyti laikymo dėžėje.

Maksimali vartotojo apkrova - nėra apribota

Valymas - C4 pagalvėlės, turinčios centrinį vožtuvą, negalima skalbti skalbimo mašinoje. Galima pagalvėlės užvalkalco skalbimo temperatūra (60° C) neturėtų būti viršijama. Atkreipkite dėmesį, jog sterilizacija UV šviesa yra negalima, nes tai gali sugadinti medžiagą.

Skysčiai valymui - naudojami skysčiai, kurie savo sudėtyje neturi silikoninės alyvos, nes jie gali pažeisti pagalvėlės medžiagą.

Skystis pagalvėlės apsaugojimui - nebūtinai

Rusenimas ir karšti pelenai - pagalvėlės užvalkalas yra antipireninis. Tačiau, kontakto su įkaitintu daiktu metu, užvalkalas vis vien gali būti pažeistas.

Pagalvėlės perdavimas kitam asmeniui - jeigu pagalvėlė yra perduodama kitam asmeniui, pagalvėlės užvalkalas turėtų būti dezinfekuotas ir išvalytas netgi tada, kai nėra akivaizdžiai matomo purvo. Mes rekomenduojame įsigyti naują užvalkalą.

Optimalus pritaikymas sėdynei - sėdynės plotis ir gylis turi būti pritaikytas prie neįgaliojo vežimėlio. Jeigu pagalvėlė yra per didelė, gali atsirasti oro nutekėjimas. Jeigu ji per maža – pagalvėlė pacientui nesuteikia tinkamo spaudimo sumažinimo.

Oro nutekėjimas - esant oro nutekėjimui, siekiant patikrinti vožtuvą, pagalvėlę reikia pripildyti oru. Jeigu vožtuvas uždarytas teisingai, susisieki su savo sveikatos priežiūros specialistu arba medicininių produktų tiekėju.

Skylė pagalvėlėje - jeigu pagalvėlėje pastebėjote skylę, susisieki su savo sveikatos priežiūros specialistu arba medicininių produktų tiekėju.

Gyvūnai - jeigu savo gyvenamojoje vietoje turite gyvūnų, būkite atidūs, kadangi jie gali apgadinti pagalvėlę

